

BACTICID



Medicīnas ierīču ātrās dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes

Izmantošana

Dezinfekcijas līdzeklis alkohola izturīgu virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai

Raksturojums

BACTICID piemīt plašas fungicīdas, baktericīdas un virucīdas īpašības, iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus un sēnītes, tsk. TBC, HBV, MRSA, Vakzinia, Herpes simplex, BVDV, Adeno, Popova, Rota u.c. Tas ir efektīvs līdzeklis, lai steidzamā kārtā dezinficētu aprīkojumu un virsmas, attiecībā pret kurām izvirzītas paaugstinātas higiēniskas prasības. Līdzeklī **BACTICID** ir izmantots tīrs, mazgaistošs etilspirts, lai neradītu respiratoro alerģiju personālam. Nesatur izopropilspirtus, hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolus.

Pamatlietošanas veids/-i

BACTICID lieto ātrai virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību. Piemērots lietošanai uz visām mitrumizturīgajām virsmām (medicīnisko ierīču korpusiem, nestuvēm, imobilizācijas līdzekļiem, krēslu pārvalkiem, sienām u.tml.). Nav piemērots akrila virsmām.

Papildus lietošanas veids/-i

BACTICID lieto arī ātrai virsmu dezinfekcijai izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas (gaļas, piena, zivju un augu izcelsmes) pārstrādes uzņēmumos, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros un citās vietās ar augstām higiēnas prasībām, tsk., pārtikas pārstrādes uzņēmumos, veikalos, kafejnīcās u.c. – virsmu, galdu, ledusskapju, vitrīnu, svaru un iekārtu dezinfekcijai; pirmsskolas un vispārīgās izglītības iestādēs – visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai; frizētavās, kosmētiskajos salonos – kosmētisko krēslu, galdiņu, kosmētiskā inventāra u.c. virsmu dezinfekcija; citur - visa veida virsmu un inventāra ātrai dezinfekcijai

Lietošana

Produktu uzklāj vai izsmidzina vienmērīgi noklājot visu dezinficējamo virsmu. **Gatavs lietošanai.** Iedarbības laiks laiks **30 sek.**

Aktīvās vielas

100g satur: Etanols 72g, 2 četrreizvietotā amonija savienojumi (benzil-C12-18-alkildimetil-, hlorīdi - 0.0125g un četrreizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, hlorīdi 0.0125g) 0.025g.

Darba drošības un pirmās palīdzības norādījumi

Pirms lietošanas lasiet produkta etiķeti un vajadzības gadījumā anotāciju un drošības datu lapu.

Vispārējie drošības noteikumi: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/tvertnessaskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Darba drošības noteikumi: skatīt drošības datu lapas 7.sadaļu

Uzglabāšana: glabāt sausās telpās, temperatūrā – 5-30°C.

Drošības prasības: skatīt drošības datu lapas 8.2.sadaļu.

Pirmās palīdzības pasākumi:

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: Saindēšanās simptomi var parādīties pēc iedarbības, tādēļ šaubu gadījumā vērsieties pie ārsta kā pēc tiešas saskares ar ķīmisku produktu vai izjutot nemīgtu diskomfortu. Uzrādiet ārstam šī produkta drošības datu lapu.

Pēc ieelpošanas: Šis produkts nesatur vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas ieelpošanai. Tomēr gadījumā, ja parādās saindēšanās simptomi, pārvietojiet cietušo no riska vietas un nodrošiniet svaiga gaisa piekļuvi. Ja simptomi kļūst smagāki vai nepāriet, vērsieties pie ārsta.

Pēc saskares ar ādu: Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskarē ar ādu. Ja saskare ar ādu ir notikusi, ir ieteicams novilkt piesārņoto apģērbu un apavus, noskalot ādu vai nepieciešamības gadījumā rūpīgi nomazgāt cietušo ar aukstu ūdeni un neitrālām ziepēm. Smagas reakcijas gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Pēc saskares ar acīm: Rūpīgi vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar ūdeni. Ja cietušais lieto kontaktlēcas, tās ir jāizņem, ja vien tās nav pielipušas pie acīm, jo tas var radīt papildu bojājumus. Visos gadījumos pēc tīrīšanas ir nekavējoties jādodas pie ārsta, ņemot līdzi produkta Drošības datu lapu.

Pēc norīšanas: Neizraisiet vemšanu. Ja cietušais sāk vemt, turiet viņa / viņas galvu augšā, lai izvairītos no aizrīšanās. Ļaujiet cietušajam atpūsties. Izskalojiet muti un kaklu, jo tie var būt traumēti norīšanas laikā.

Paplašināti - skatīt produkta drošības datu lapu.

Citi ierobežojumi

Produkts paredzēts tikai profesionālai izmantošanai!

Piezīmes

BACTICID atbilst likumdošanas prasībām kā medicīnas aprīkojums, saskaņā ar ES direktīvu 93/42/EEC un atbilst likumdošanas prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Satur biocīdu! Ievērot līdzekļa derīguma termiņu (skat. uz iepakojuma). Biocīda inventarizācijas numurs 11122003/1471 (2.,4.produkta lietošanas veids).Utilizācija: iepakojums - izskalotu iepakojumu nodod pārstrādei.

Iepakojumi

500ml ar smidzinātāju

1000ml ar smidzinātāju

5L

**Ražotājs**

A/S CHEMI-PHARM, Tānassilma tee 11, Tānassilma küla, Saku vald, Igaunija, 76406

Izplatītājs Latvijas Republikā:**SIA CHEMI PHARM LATVIA**

Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058

Tel. +371 66010634, Fakss +371 66010635

e-mail: office@chemi-pharm.com

www.chemi-pharm.com

